

Technisches Datenblatt



MyClean® DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol

- Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen
- Wirkt bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid **PLUS**
- Begrenzt viruzid PLUS, wirksam gegen behüllte Viren z. B. HIV, HBV, HCV, sowie Influenza-/Grippe-Viren
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Gute Benetzung
- Schnelle Auftrocknung
- VAH-gelistet



Anwendung:

Anwendung: Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit MyClean® DS OA benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch.


Ausführungen:

MyClean® DS OA – Schnelldesinfektion ohne Alkohol

Artikelbeschreibung/ Article Description	Pack.-Inhalt/ Content	Art.Nr./ REF	EAN	PZN	Pack/ VE
Schnelldesinfektion ohne Alkohol <i>rapid disinfection without alcohol</i>	1 L	79613	4046153116164	10305769	12
Schnelldesinfektion ohne Alkohol <i>rapid disinfection without alcohol</i>	5 L	79711	4046153126217	–	2
Schnelldesinfektion ohne Alkohol <i>rapid disinfection without alcohol</i>	10 L	79614	4046153116188	10305781	1

Einwirkzeiten:

Wirksamkeiten gem. EN/Methoden der VAH/DGHM	Einwirkzeiten
Bakterizidie (EN 13727) Levurozidie (EN 13624) (hohe Belastung)	konz. 1 Minute
Bakterizidie, Levurozidie (EN 16615 – 4-Felder-Test; hohe Belastung)	konz. 1 Minute
Viruswirksamkeiten (EN 14476)	
Begrenzt viruzid PLUS	konz. 60 Minuten
Begrenzt viruzid	konz. 1 Minute
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV; hohe Belastung)	konz. 1 Minute
Noroviren (hohe Belastung)	konz. 30 Minuten
Adenoviren (hohe Belastung)	konz. 60 Minuten

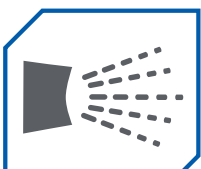

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-OA-20191010

Technisches Datenblatt



MyClean[®] DS OA Schnelldesinfektion ohne Alkohol

Zusammensetzung: Zusammensetzung: In 100 g sind enthalten:
Wirkstoffe: 0,1 g 2-Phenoxy-ethanol; 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzyl-
ammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin.

Warnhinweise: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe tragen.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: mit viel Wasser waschen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen. Weiter spülen.
Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/
nationalen/internationalen Vorschriften

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
Medizinprodukt der Klasse IIa

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:    

